

Masques chirurgicaux Type IIR

**Avantages du masque :**

- Elastiques non agressifs et confortables à mettre derrière les oreilles
- Tissus non-tissés sans fibre de verre
- Barrette nasale double âme métallique, améliorant l'application et la tenue sur le visage, antibuée
- Média haute filtration ; polypropylène
- Matières douces et non irritantes, sensation du coton

**Dispositif médical de classe I :**

Domaine du médical et paramédical, de l'industrie, du BTP, des administrations, du commercial.

**Coloris unique :**

Bleu

**Descriptif technique et composante du masque :**

- A usage unique et non stérile.
- Norme EN 14683 + AC2019, Type IIR et norme CE.
- Sans latex, bisphénols et phtalates.
- Tissus non-tissés de couleur bleu (face externe) et blanche (face interne) 100% polypropylène(25g).
- Filtre médian 100% polypropylène (25g).
- Elastique en tricotine élastique (15% lycra, 85% polypropylène), diamètre 2 mm.
- Barette nasale composée de 2 fils métalliques (exempt de métaux lourd, diamètre de 0.50mm), entourés d'une gaine plastique (Polypropylène), de dimension de 3 mm.

Modèle / Réf / Code UID GS1	Taille du masque	Conditionnement
Adulte, Grande Taille / 1200-01 / 3 770021726148	195 x 90 mm	Boîte de 50 masques
Adulte / 1100-01 / 3 770021 726001	175 x 90 mm	Boîte de 50 masques
Adolescent / 2100-01 / 3 770021 726025	160 x 90 mm	Boîte de 50 masques
Enfant / 3100-01 / 3 770021 726032	145 x 90 mm	Boîte de 50 masques
Bébé / 4100-01 / 3 770021 726216	115 x 90 mm	Boîte de 50 masques



## Masques chirurgicaux Type IIR

### Origine matièresières lères :

Notre fabricant et fournisseur de tissus non-tissés pour la face externe (couleur bleu), face interne (couleur blanche) est basé en Alsace.

Notre fabricant et fournisseur du tissus filtrants est basé dans le Jura.

Notre fabricant et fournisseur de barrette nasale est basé dans les Vosges.

Notre fabricant et fournisseur des élastiques est basé en Haute Loire.

### Conditionnement :

Les masques chirurgicaux sont emballés dans des boites cartonnées contenant 50 masques.

Nos produits finis sont emballés dans des cartons et posés sur palette. Chaque palette se compose de 8 cartons de 3 000 masques chacun, soit la palette de 24 000 masques, ou, 36 000 masques, à convenance.

### Lieu de fabrication :



Les masques sont fabriqués et conditionnés sur notre site :

**FAMILY CONCEPT** - 2 rue Coinveaux – 54920 VILLERS LA MONTAGNE

### Performance de notre masque :

ESSAI	Type IIR	Masque "Les soufflantes"
Efficacité de filtration bactérienne (EFB), (%)	> 98	<b>99,99</b>
Pression différentielle (PA/cm <sup>2</sup> )	< 60	<b>52,56</b>
Pression de la résistance aux projections (kPa)	> 16	<b>18</b>
Propreté microbienne (ufc/g)	< 30	<b>16,4</b>
Test de cytotoxicité		<b>Masque conforme</b>
Test Biocompatibilité		<b>Masque conforme</b>

### Durée de vie du masque :

Notre masque a une date de péremption de 5 ans. Pour connaître sa date exacte, consulter l'étiquette collée sur la boîte de conditionnement, vous trouverez la date de fabrication à côté du logo  et sa date de péremption à côté du logo .

### Élimination du masque :

Après utilisation du masque (4h maxi) :

- Mettre le masque dans une poubelle identifiée pour les dispositifs médicaux (si présente), ou dans un sac hermétique disposant d'un système de fermeture
- Le sac contenant les masques usagés doit être conservé 24h
- Après 24h, le sac peut-être mis dans la poubelle pour ordures ménagères

Ne pas « brûler » le masque, ni le jeter sur voie publique.

Ne pas mettre les masques dans les poubelles de déchets recyclables

### Masques chirurgicaux Type IIR

#### Comment mettre son masque :

	<p><b>1</b></p> <p>Bien se laver les mains</p>		<p><b>2</b></p> <p>Mettre les élastiques derrière les oreilles</p>		<p><b>3</b></p> <p>Pincer le bord rigide au niveau du nez, abaisser le masque en dessous du menton et ne plus le toucher</p>
--	--	---	--	---	--

#### Conseils d'utilisation :

##### Masque chirurgical Type IIR

- Se laver les mains avant de mettre le masque, le masque doit être porté sur peau saine
- Positionner le haut du masque sous les yeux et le bas du masque sous le menton (recouvrir la bouche et le nez)
- La partie bleue du masques est la face extérieure, la partie blanche est la face intérieure (contre le visage)
- Pincer la barrette nasale métallique, cette dernière sert également d'antibuée
- Ne plus le toucher ni le masque, ni le visage une fois le masque installé
- Ne pas changer de côté après utilisation
- Ne pas porter le masque plus longtemps que la durée conseillée (4h), la réutilisation ou prolongation d'utilisation du masque peut occasionner des infections, contaminations croisées ou des problèmes cutanés
- En cas d'irruption cutanée, consulter un médecin
- En cas d'incident grave survenu en lien avec le masque, contacter Family Concept et/ou l'ANSM
- Se laver les mains avant de retirer son masque
- Retirer le masque par les élastiques pour le jeter dans une poubelle ou un sac hermétique
- Ne pas ranger dans un sac ou des poches de vêtements sans protection du masque (ex : sachet hermétique)
- Le port du masque est déconseillé aux enfants de moins de 6 ans

#### Conseils de stockage :

- à conserver dans la boîte d'origine
- ne pas stocker au soleil (+ 40°)
- ne pas stocker dans une pièce humide (contact de l'eau, taux d'humidité inférieur à 60%)
- ne doit pas subir d'exposition à des variations de températures importantes